



## Sterylność:

Wszystkie sprzedawane krople są sterylne. Jeśli to możliwe firma Disop unika używania konserwantów.

Clean Active Premium Drops jest sterylnym, kleistym i klarownym, nawilżającym i odżywiającym roztworem z kwasem hialuronowym i wspomaga samoregenerację właściwości rogówki.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Clean Active Premium Drops chroni oczy przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości, a w przypadku zmęczonych, podrażnionych oczu zapuszczenie kilku kropli do oka uśmierza lub zupełnie eliminuje odczucie dyskomfortu. Produkt nadaje się do użycia do dwóch miesięcy po otwarciu butelki. Okres przechowywania nie otwartej butelki: zobacz oznaczenie terminu przydatności na etykiecie.

## Skład:

Hialuronian Sodu  
Hydroksyetyloceluloza  
Choleerek sodu  
Kwas borowy  
Tetraboran sodu  
Wersenian disodowy 0,02%  
Polihexanid 0,0001%  
Woda oczyszczona

## Zastosowanie:

Odczuwanie swędzenia, pieczenia oczu lub ich zaczerwienienia i zmęczenia może być spowodowane wieloma czynnikami, w tym:

- podrażnieniami na skutek noszenia soczewek kontaktowych;
- intensywnym wpatrywaniem się w ekran,
- przeciągłym kierowaniem samochodem lub motorem; klimatyzają, wiatrem,
- zanieczyszczeniem powietrza, wodą z basenu, itd.

## Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej nie używać razem z lekami do oczu. Nie używać w przypadku zakażenia oczu.

W przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik Clean Active Premium Drops

## Bezpieczeństwo:

Produkty firmy Disop spełniają rygorystyczne wymogi gwarantujące możliwie najlepszą konserwację i bezpieczeństwo soczewek. Wymogi jakości firmy Disop odpowiadają standardom ISO. Wszystkie produkty posiadają numer certyfikatu zgodności odpowiadający Dyrektywie Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych nr. 93/42/EU.

## Instrukcja użycia:

Można stosować krople Clean Active Premium Drops do oczu na dwa różne sposoby: bezpośrednio do oczu lub poprzez soczewki kontaktowe.

A. Bezpośrednio do oczu:

jeśli nosisz soczewki kontaktowe możesz je zostawić w oczach );  
Połóż palec wskazujący na dolnej powiece oka i lekko pociągnij powiekę w dół;  
Drugą ręką przenieś butelkę nad dolną powiekę oka; butelka nie może dotknąć oka!  
Wpuść 1 lub 2 krople do oka i zamrużaj 2 lub 3 razy pozwalając by roztwór równomiernie pokrył oko.

B. Lub, jeśli tak chcesz, poprzez soczewki kontaktowe:

połóż soczewkę na środkowy palec;  
wlej 1 lub 2 krople na soczewkę a następnie włóż soczewkę do oka;

zamrużaj okiem 2 lub 3 razy;



Código EAN:  
843508000372

DYSTRYBUTOR

KODANO S.A.  
ul. Samozwaniec 39, 31-711 Kraków,  
Polska, tel: (+48 12) 371 10 41,  
kontakt@szkla.com, www.szkla.com

